

業界初。水循環フィルター、小型強力DCモーター搭載。



MIRACLE

ミラクル脱毛機の特長

1. エステティシャンとメンテナンス業者との共同開発。

エステティシャンとメンテナンスが協力して故障率ゼロを目指し、使いやすさ・安心安全で結果の出るマシンを製造。

2. 最先端の新理論 連続短形波 NPL方式を採用。

NPL(ニューパルスライト)を低フルエンスで連続的に照射する事により、NPLエネルギーを熱エネルギーとして真皮層に蓄熱させ、減毛・美肌ケアを行う新理論光美容機器。

3. 業界初! 卓上型脱毛機でイオン除去フィルターを搭載。

- 常に浄化された水を循環させることにより、機械の性能を最大限発揮。
- 水のヌメリや汚れ詰まり等を80%カット。
- 機能性、冷却性能を常に安定に保ち、成果効率をより良い状態に保ちます。
- 水による故障トラブルを抑えることに成功。



ミラクル脱毛機の特長

4.小型強力DCモーター(12V)を搭載、トラブルを軽減。

水流パワーUPで循環水の温度を安定的かつ低温に保つ事に成功。100%の力を発揮できるハイスペック、ハイパワーにグレードアップ！

ミラクル脱毛機は水流のモーターを小型強力DCモーター12Vのハイパワーに変え、水膜や汚れを飛ばし、故障トラブルを抑えることに成功。

脱毛機に必要な最新の電力システムを搭載。

5.冷却効果の高い4種のハンドピースと高品質ランプ

ミラクル脱毛機は、SHR/IPL(脱毛)・SSR/FSC(フォト)の4種類のハンドピースをご用意。

ドイツ製の高品質ランプを使用し波長も最適な数値で設定。

最大限な効果で、重ね打ち不要・低コストで施術も簡単。



冷却効果の高い4種類のハンドピース

- ミラクル脱毛機は、SHR・HR(IPL) (脱毛) / SSR・FSC(フォト)の4種類のハンドピース。
- ドイツ製高品質ランプを使用。
- キッズ脱毛やメンズのヒゲ脱毛も施術可。
- お肌に触れる照射面は最大-15°C冷却。
- 重ね打ち不要・低コスト・簡単施術。




- SHR:(脱毛用連射)60万発 3~10連射設定 波長:640~950nm 照射サイズ:15mm×50mm
- HR(IPL):(脱毛用単発)25万発 単発照射 波長:640~950nm 照射サイズ:15mm×50mm
- SSR:(シワ・たるみ・赤ら顔・ニキビ・美白・バストケア)40万発
波長:560~950nm 照射サイズ:15mm×50mm
- FSC:(シミ・シワ・たるみ・赤ら顔・毛穴ケア・くすみ・ニキビ・美白・バスケケア)25万発
波長:560~950nm 照射サイズ:8mm×40mm

※初期導入時、2本付属でハンドピースを選択できます。その他HPも別途費用で購入も可能。

ミラクル脱毛機の特長

6.毛周期や毛の種類を選ばず短期間で高い効果。

ミラクル脱毛機はSHR方式(ハイブリット)でバルジ領域にある毛発生母地(毛幹細胞)をターゲットにしている為、毛周期が関係なく毛の太さ種類(うぶ毛・白髪・金髪)に影響されることなく施術が可能です。また、2週間おきに施術可能！完了期間は最短6カ月！
役務消化など回転率もUP！

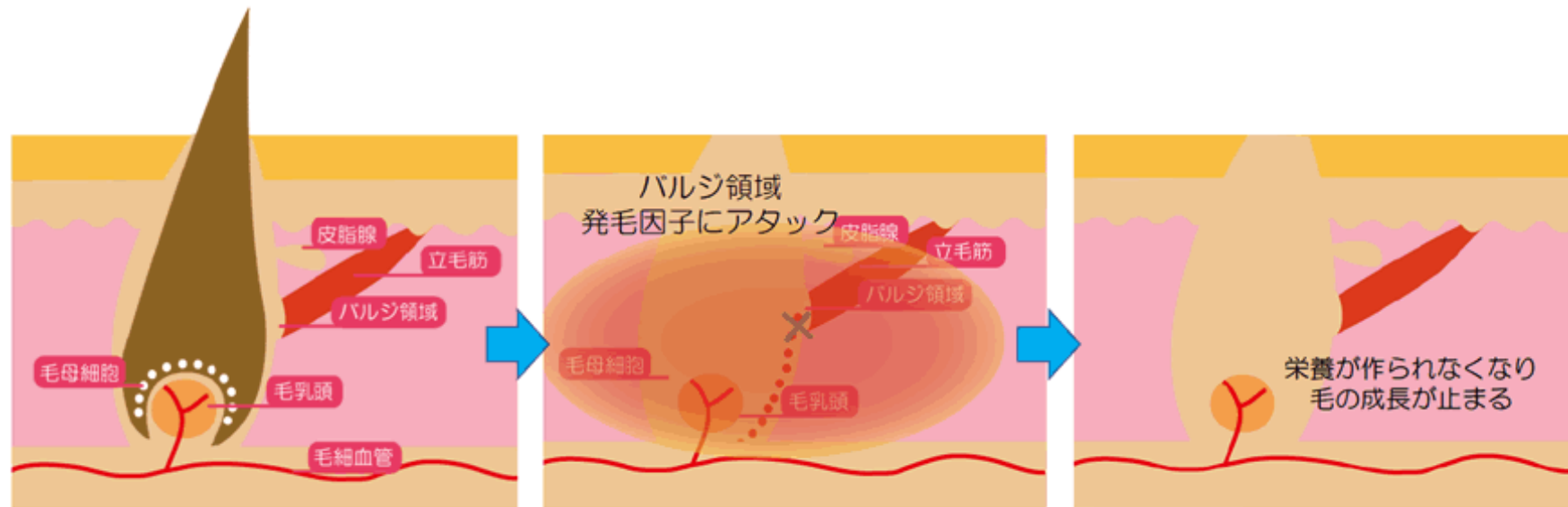

ミラクル脱毛機の特長

お肌に触れるクリスタルは最大-15℃まで冷却できるため“痛み”や“熱”から解放され、キッズ脱毛やメンズのヒゲ脱毛も問題なく施術が行えます。この冷却機能により、強いパワーを出しても安全性が確保できるので、初めて脱毛機を扱う方でも安心して施術を行えます。ミラクル脱毛機はSHR(ハイブリット)と従来のIPLの2種類のハンドピースをご用意していますので、サロン様によっては使い分けが可能です。

☆光フェイシャル・バストケア

お肌に光を照射することで繊維芽細胞を活性化させ、コラーゲン生成を促進してお肌にハリやツヤを与えます。お顔だけでなく、バストケアの機能も付いており、その他、赤ら顔、くすみ、にきびケアに対してもアプローチが可能です。

※フェイシャル(FSC)は4週間隔で施術。

従来のIPLとの比較 (除毛・減毛)

SHR


ミラクルシリーズは、毛根のメラニンだけをターゲットとするのではなく、バルジ領域にある毛の発生母地(毛幹細胞)もターゲットとしている為、毛周期や毛の太さに影響されにくく、産毛・白髪・金髪にも効果が高いとされています。さらにこの毛幹細胞は低エネルギーをロングパルス照射した場合不活性します。

	SHR	IPL	レーザー
仕組み	弱い光を連続して毛包に作用させる	光の熱を使用して毛根に作用させる	レーザーの熱を毛根に作用させる
痛み	無痛 温かさを感じる程度	一瞬の軽い痛み	刺すような強い痛み
肌へのダメージ	温かい程度	軽い火傷の可能性	一般的な炎症の可能性
時間	10秒に1000本	10秒に100本	10秒に100本
完了期間	最短6ヵ月	2年~4年	1年
通う間隔	2週間~1ヵ月	2ヵ月~3ヵ月	2ヵ月~3ヵ月

パルス比較

NPL（ニューパルスライト）とは、火傷などを引き起こす可能性のある瞬発的な高いエネルギー（ピーク値）を取り除いた短形波の光エネルギーです。

また、ミラクルシリーズは毛周期を選ばない新しい減毛理論を用いるので、従来1年半～2年を要した期間を1/3以下の期間で集中的に行うことが可能です。

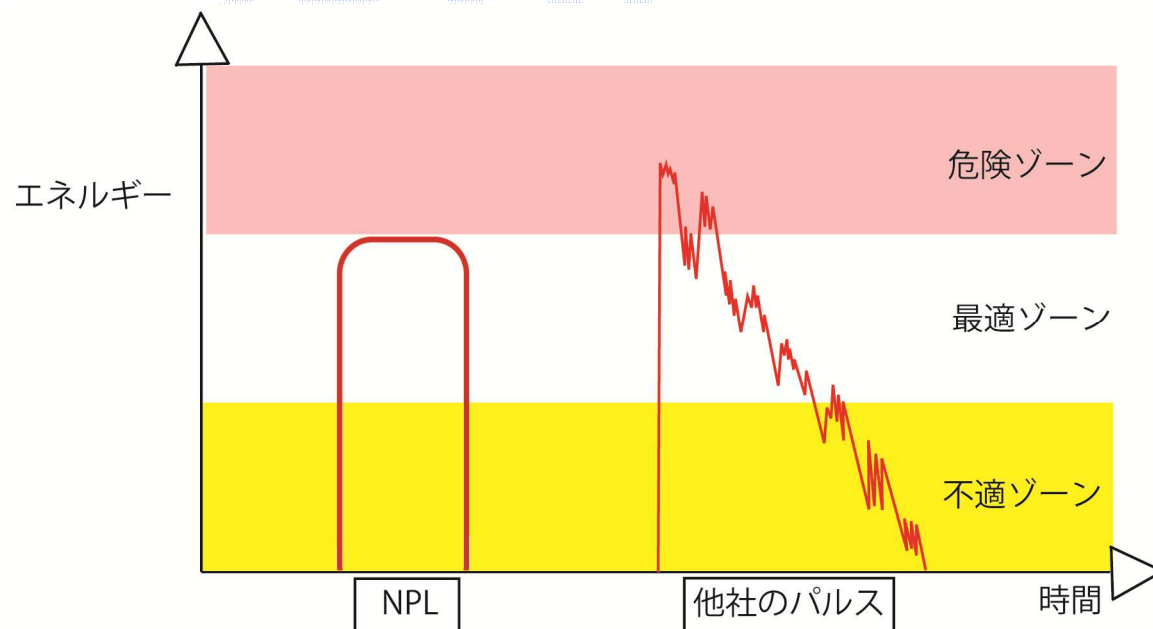

ミラクル脱毛機の特長

7.全身脱毛 約30分。時短効率。

全身脱毛で約30分と短時間で施術が行えます。お客様にも負担をかけず、回転率UP。連続照射が可能でクリスタルを滑らせながら照射していくため、施術時間を大幅に短縮。片道照射でしっかりと効果を実感できるので往復照射の必要はありません。

8.安心のサポート体制とアフターフォロー。

サロン経営や施術に経験豊富なインストラクターが講習致します。結果の出やすい理論と施術方法を解説。アフターフォローも安心です。

3年保証でメンテナンスや故障時での代替えマシン対応も行っております。



コスト SHR

SHR 60万ショット

HR 25万ショット

SSR 40万ショット

FSC 25万ショット

ハンドピース価格/1本

新品 / 28万円

再生 / 24万円

全身脱毛 / 1ショット0.4円

《使用ショット数》


全身 約2000~2500ショット

《コスト》

全身 約800円~1,000円

※全て税別価格表示です

売上予想

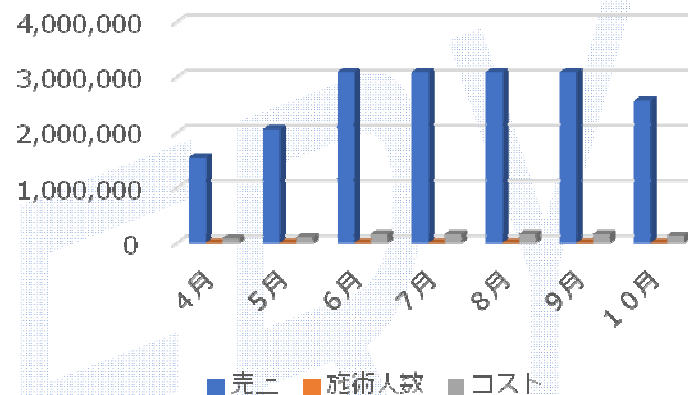

全身脱毛 1日の売上げ例

19,800円/1回 所要時間30分 /1日6名施術

19,800円 × 6名 = **118,800円** (1日の売上)

月間売上 **118,800円 × 26日 = 3,088,800円**

ハンドピースは100万ショットを照射すると光のパワーは徐々に低下し部品の劣化もございます。
MIRACLE シリーズは適切な効果を出す為にSHRは60万ショットと設定しています。

コスト FSC

SHR 60万ショット

HR 25万ショット

SSR 40万ショット

FSC 25万ショット

ハンドピース価格/1本

新品 / 28万円

再生 / 24万円

フェイシャル/1ショット0.96円

《使用ショット数》

全顔 約250ショット

《コスト》

全顔約240円

※全て税別価格表示です

全顔 フェイシャル 1日の売上

19,800円/1回 所要時間20分/1日5名施術

19,800円 × 5名 = **99,000円** (1日の売上)月間売上 **99,000円 × 26日 = 2,574,000円**

ハンドピースは100万ショットを照射すると光のパワーは徐々に低下し部品の劣化もごさいます。
MIRACLE シリーズは適切な効果を出す為にSHRは60万ショットと設定しています。

ミラクルシリーズ仕様

商品名	MIRACLE SK-1	MIRACLE MK-2
サイズ	W330×D530×H390mm	W450×D530×H430mm
重量	25Kg	35Kg
用途	脱毛・光フェイシャル・バストケア	
ハンドピース	シングルタイプ（着脱式）	ダブルタイプ
照射サイズ	・15×50mm 脱毛/フェイシャル / ・8×40mm (FSC) フェイシャル	
FCSパルス	1/2/3/4/5pulse インターバル1/2/3/4/5s	
SHR周波数	3HZ 4HZ 5HZ 6HZ 10HZ/1秒	
光源ランプ	ドイツ製 キセノンランプ	
照射面	サファイア	
ヘッド冷却方式	ペルチエ素子、水冷、空冷	
ヘッド冷却温度	最大-15℃	
消費電力/電圧	1500W 100V 50Hz/60Hz	
保証期間	3年（本体のみ）	
ランプ交換	脱毛：SHR 60万発 / HR (IPL)25万発 脱毛 フォトフェイシャル：FSC 25万発 / SSR40万発	

BRAVERY

MIRACLE

ミラクルシリーズ仕様



SK-1



MK-2

メーカー価格:お問い合わせください。

■ 初期導入時ハンドピース2本付
(SHR/HR:脱毛・SSR/FSC:フェイシャル)4種から選択。

■ 付属品一覧

脱毛用ハンドピース/フォト用ハンドピース

施術者用ゴーグル/お客様用ゴーグル

フットペダル/電源ケーブル/除去フィルター/テキスト

BRAVERY**MIRACLE**